



Prévenir la carie dentaire avec un vernis fluoré

De quelle façon le fluorure prévient-il la carie dentaire?¹

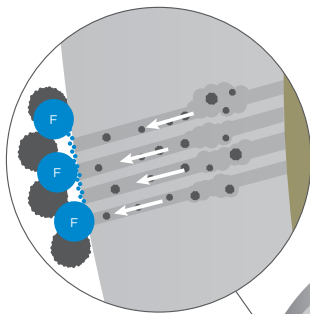


INHIBE LA DÉMINÉRALISATION

Le fluorure convertit l'hydroxyapatite en cristaux de fluorapatite, et ceux-ci nécessitent plus d'acidité pour se déminéraliser.

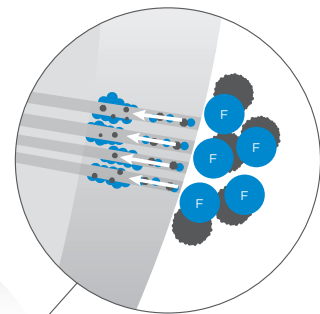


INTERFÈRE AVEC LE MÉTABOLISME BACTÉRIEN

Dans un environnement acide, les ions fluorure peuvent interférer avec l'activité enzymatique des bactéries qui engendrent la carie dentaire.

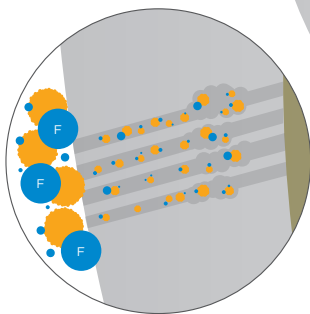

ENCOURAGE LA REMINÉRALISATION

Le fluorure joint les ions calcium et phosphore ensemble ce qui accélère le processus de reminéralisation et rend la surface plus résistante aux attaques d'acide.

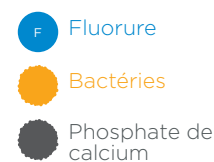


Consultez les avantages
d'employer le Vernis
Nupro® White au verso.



Vernis Nupro[®] White Fluorure de sodium 5%

Dans une étude sur le niveau d'absorption en fluorure de l'émail, le Vernis Nupro[®] White a été comparé au Vernis Vanish^{MC} de 3M. Voyez les résultats.*

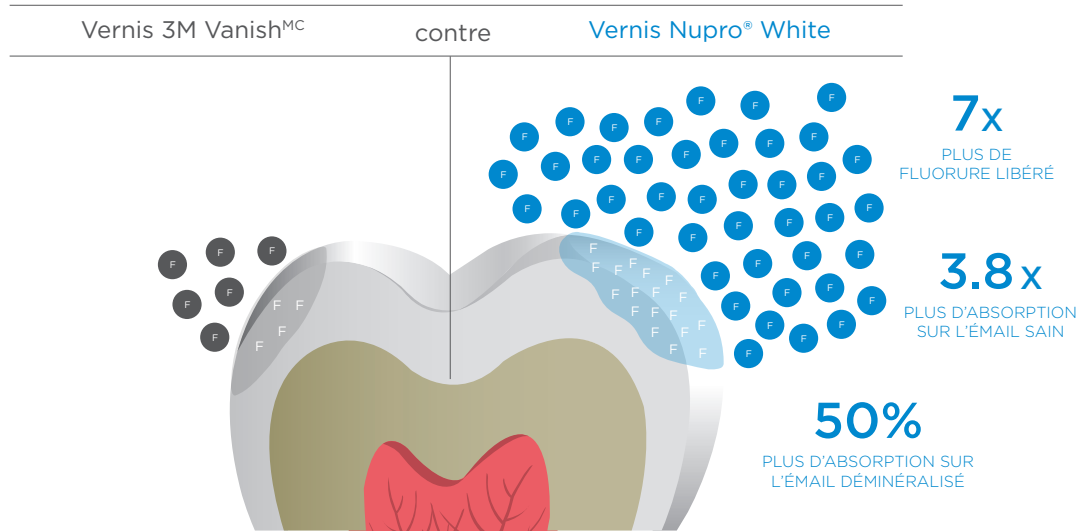

*Dans une étude sur le niveau d'absorption en fluorure de l'émail, le vernis a été appliqué sur des échantillons d'émail sain et poli. Chaque échantillon a été jumelé à un autre échantillon sur lequel une lésion carieuse débutante artificielle a été créée et non traitée avec un vernis fluoré. Les paires d'échantillons ont été submergées dans de la salive artificielle pour une période de 5 minutes et ensuite placés dans une nouvelle solution de salive artificielle. Cette procédure a été répétée après 15 minutes, 30 minutes, 1 heure et 4 heures et ensuite, les échantillons ont demeuré dans la salive artificielle pour un total de 24 heures. Après 24 heures, une couche d'émail a été retirée de chacun des échantillons et la quantité de fluorure a été mesurée. Le vernis Nupro[®] White a démontré une absorption en fluorure significativement plus élevée et ce, autant sur l'émail sain que sur l'émail déminéralisé lorsque comparé au vernis VOCO Profluorid[®] et au vernis 3M Vanish^{MC}.

DISPONIBLE DANS LE FORMAT DE VOTRE CHOIX



Caramel



Raisin



Menthe



Framboise



Gomme balloune

Ensemble de livraison simplifiée

50/boite #130316
100/boite #130317

Unidoses

50/boite #130210
100/boite #130211

Unidoses

50/boite #130222
100/boite #130223

Unidoses

50/boite #130213
100/boite #130214

Unidoses

50/boite #130221

Ensemble de livraison simplifiée

50/boite #130322
100/boite #130323

Ensemble de livraison simplifiée

50/boite #130312
100/boite #130313

Conçu pour une manutention facile et une mise en place simplifiée¹

- S'applique sur une dent humide
- Préparation unique qui minimise la formation de masses, sans couler ni faire de filets
- Facile à voir durant l'application puis forme un fini transparent après le temps prise
- S'étend facilement sur les dents pour laisser une couche uniforme

Temps de port plus court lorsque comparé à d'autres marques de vernis reconnues*


- Temps de port de 2 heures ainsi les patients peuvent se mettre à boire et à manger plus rapidement

Sans gluten ni SLS, ni colorant

Pour plus d'information ou pour commander, faites-le **1.877.393.3687** ou consultez le site, dentsplysirona.com



Montage

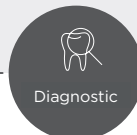


Diagnostic




Anesthésie



Détartrage

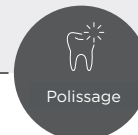

Polissage

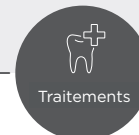

Traitements

La division Prévention de Dentsply Sirona vous offre une panoplie de solutions et de support technique pour toutes vos interventions préventives.

* Données en filière, Dentsply Professional.

¹ Nelson, Travis. "The Key to Caries Prevention." Dimensions of Dental Hygiene (2011): 48-50.