

Faites l'expérience
d'un contrôle complet
dans la paume de
votre main.



Nupro Freedom^{MC}

Système pour prophy sans fil avec la technologie SmartMode^{MC}


Votre système de prophy est maintenant plus intelligent.

Comment fonctionne la technologie SmartMode^{MC}?




1. Mettre en marche

La cupule se met à tourner à 500 tours/minute lors de la mise en marche

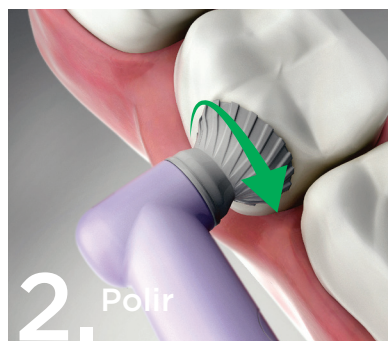

2. Polir

La vitesse de la cupule augmente au même rythme que vous appuyez contre la dent jusqu'à une vitesse maximale de 3000 tours/minute. Vous pouvez réduire ou augmenter la vitesse comme vous le désirez en apposant moins ou plus de pression sur la cupule

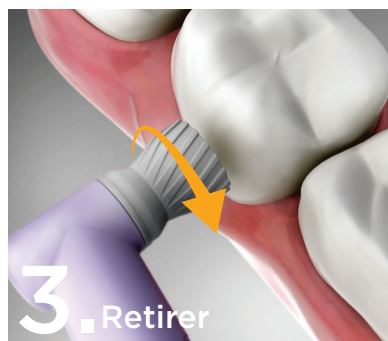

3. Retirer


La vitesse de la cupule diminue automatiquement lorsqu'on la retire de la dent

Nous vous présentons le seul système de prophy avec la technologie SmartMode^{MC}.

La nouvelle technologie révolutionnaire SmartMode^{MC} du système Nupro Freedom vous permet de contrôler la vitesse du contre-angle à prophy automatiquement qu'avec la pression déployée contre la dent éliminant ainsi le besoin d'avoir un rhéostat.

Plus rapide

Nupro Freedom^{MC} possède la vitesse et la puissance dont l'hygiéniste dentaire a besoin pour effectuer le polissage des dents.

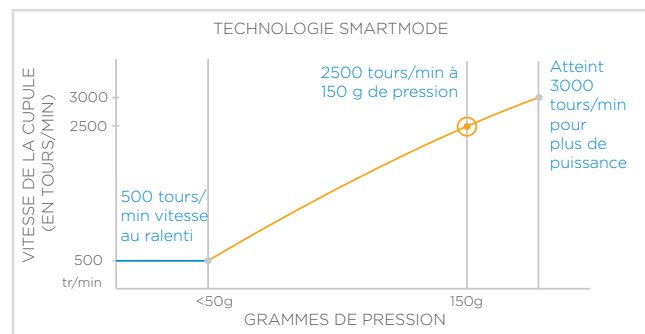

⦿ D'après une étude publiée dans le Journal of Dental Research, la vitesse et la pression moyennes employées par les hygiénistes dentaire durant le polissage (avec un rhéostat) est de l'ordre de 2500 tours/min et de 145 g de pression.⁷

Meilleur

- 🍃 Design léger et sans fil
- 🎯 Pas besoin de rhéostat (optionnel)
- ⚡ 25% plus de vitesse et de puissance¹
- 🔋 Doté d'une journée complète d'autonomie de la pile avec recharge rapide en 15 minutes
- 🔊 Système plus silencieux que toutes les autres versions de pièces à main à l'air ou à basse vitesse



Plus sécuritaire

Protège vos patients contre le risque d'infection.

Les directives du CDC en matière de stérilisation recommandent que:

Les pièces à main et tous les attachements connexes, incluant les moteurs à basse vitesse et les contre-angles à prophy réutilisables, soient toujours stérilisés à la chaleur entre les patients et non pas désinfectés avec un désinfectant de haut niveau ou un désinfectant de surface ³

L'ensemble de prophy sans fil Nupro Freedom^{MC} inclut 3 gaines externes autoclavables avec joint d'étanchéité — offrant une barrière contre le risque d'infection. Les gaines externes autoclavables remplacent le besoin de se procurer plusieurs pièces à main pour arriver à rencontrer les Directives de contrôle des infections publiées et ainsi **réduire les coûts d'achat d'équipements.**

Les barrières en polyéthylène jetables Dispos-a-shield[®] facilitent le nettoyage tout en protégeant le module interne contre toute accumulation de débris. Produit est inclus dans l'ensemble de prophy sans fil Nupro Freedom.

L'emploi de contre-angles à prophy à usage unique assure une performance et un contrôle précis de la vitesse de la cupule.



Nous avons demandé à des hygiénistes dentaires d'essayer le tout nouveau système de prophy sans fil Nupro Freedom avec la technologie SmartMode.

Voici leurs commentaires...

"J'aime bien que la cupule se met à rouler plus rapidement automatiquement juste avec plus de pression."

"J'ai beaucoup plus de contrôle."

"Ça ne met aucun poids sur moi ce qui occasionnerait un mauvais alignement de mon épaule ou de mon corps; ce que j'adore."

"Éliminer le rhéostat est tout simplement une idée fantastique."

Design équilibré, léger avec une zone de préhension antidérapante qui augmente le confort et le contrôle.

Le confort du clinicien est important.

Son design sans fil élimine l'effet de tirage du boyau et permet la conception d'une pièce à main légère avec une plus grande manœuvrabilité. De plus, ceci réduit la fatigue sur le poignet de l'opérateur associée avec la trainée des boyaux et permet un accès amélioré aux dents postérieures. Et de plus, de n'avoir aucun rhéostat au pied réduit les chances de devoir compromettre sa position comme opérateur durant le polissage.

Le confort du patient est important.

La pièce à main sans fil Nupro Freedom^{MC} est plus silencieuse que toutes les autres pièces à main traditionnelles pour hygiène avec moteur à air ou celles à basse vitesse. Lorsqu'elle est combinée aux contre-angles jetables Nupro Freedom[®] Slim, elle génère moins de bruit et moins de vibration.

Pour organiser une démonstration, consultez le site, nuprofreedom.ca.

Pour un polissage supérieur, plus sécuritaire et plus rapide.

La famille de produits Nupro® offre des pièces à main pour hygiène, des contre-angles à prophy et une grande variété de pâtes à prophylaxie qui livrent une performance optimale et des résultats impressionnants.

La pâte à prophy Nupro® permet un polissage avec d'excellentes propriétés d'enlèvement des taches et une performance supérieure avec ses 4 degrés d'abrasivité et ses 13 saveurs sans gluten qui sauront satisfaire presque toutes les préférences des clients.

Pour l'hypersensibilité dentinaire, opter pour la pâte à prophy Nupro® Extra Care avec fluorure et NovaMin® éprouvée cliniquement, elle procure un soulagement immédiat de la douleur qui peut durer jusqu'à 28 jours.


Les contre-angles à prophy jetables Nupro Freedom® sont disponibles dans une variété de cupules, incluant:



Contra spirale Flexible Rigide Spirale Pédo Cupule conique Brossette effilée



Les contre-angles Nupro Freedom® Slim possèdent un collet 14% plus mince et une tête 16% plus courte⁴ pour une meilleure visibilité et manœuvrabilité.

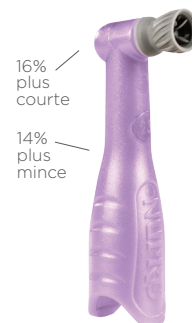

# D'ITEM	DESCRIPTION DE L'ITEM	CONTENU	
90741L01	Système de prophy sans fil Nupro Freedom ^{MC} (Rhéostat sans fil vendu séparément)	1 module interne 1 gaine externe en métal 1 chargeur 1 support à pièce à main 1 bloc d'alimentation 20 Contre-angles à prophy jetables Nupro Freedom® Slim Contra Spirale 1 boîte d'essai de Disposa-Shield® 1 manuel d'opération	SYSTÈME ENSEMBLE
90741L03	Ensemble pour prophy sans fil Nupro Freedom ^{MC} (Rhéostat sans fil vendu séparément)	1 module interne 3 gaines externes en métal 1 chargeur 1 support à pièce à main 1 bloc d'alimentation 1 boîte de barrières en polyéthylène jetables Disposa-Shield (500 unités) 1 boîte de contre-angles à prophy jetables Nupro Freedom® Slim Contra Spirale (200 unités) 1 manuel d'opération	

ACCESSOIRES EN OPTION						
90796	90799	90797	90742	90798	9070801	A88019
Gaine externe en métal	Module interne	Chargeur	Rhéostat sans fil en option	Bloc d'alimentation	Support pour pièce à main	Boîte de 500 barrières en polyéthylène jetables Disposa-shield® pour le module interne du système de prophy sans fil

¹ Comparé aux modèles Freedom précédents.

² R.P. Christensen et V.W. Bangertner "Clinical Science Determination of RPM, Time and Lead Used in Oral Prophylaxis Polishing in Vivo" Journal of Dental Research 1984; 63; 1376.

³ Centers for Disease Control and Prevention. "Summary of Infection Prevention Practices in Dental Settings: Basic Expectations for Safe Care." Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Oral Health; March 2016.

⁴ Comparé aux configurations non slim.

⁵ Boîte d'alimentation vendue séparément.

© 2017 Dentsply Sirona Preventive

Nupro Freedom^{MC} et SmartMode^{MC} sont des marques de commerce appartenant à DENTSPLY International et/ou à ses filiales. LE90795 Rev. 3 (Q217)

LF90795 Rev. 3 (Q217)

Importé et distribué par:
DENTSPLY Canada Ltd./Ltée
Woodbridge, Ontario L4L 4A3